

# BD Vacutainer™ Systems

Preanalytical Solutions

## Tube Guidelines and Mixing Guidelines



Všechny BD Vacutainer™ tubes vyžadují rozmíchání okamžitě po odběru.

Vzorky krve by měly být odebírány v následujícím pořadí:

Barevný kód	Typ	Inverze	Poznámky
	Krevní kultura		
 Světle modrá	Natrium citrát	3–4×	
 Černá	Natrium Citrát ESR	8–10×	
 Červená	Serum/Plast	5–6×	
 Zlatá	S.S.T.™ II	5–6×	
 Zelená	Heparin & P.S.T.™ II	8–10×	
 Fialová	E.D.T.A	8–10×	
 Růžová	Křížová zkouška	8–10×	
 Šedá	Fluorid Oxalát	8–10×	
 Královská modrá	Stopové prvky	8–10×	

**Nedostatečné promíchání může vést k nepřesným testům a nutnosti nového odběru.**

BD Vacutainer™ Systems Preanalytical Solutions  
Between Towns Road, Cowley, Oxford, OX4 3LY  
Tel. No.: 01865 781540 Fax: 01865 781528

BD, logo, Vacutainer, Hemogard are all trademarks of Becton, Dickinson & Company.

\*N.C.C.L.S. Guidelines H3 - A3, Vol. 11, No. 10